



**PINK 10X**  
**00551**

---

## DESCRIZIONE

---

IL TUO SOLLIEVO DAI DOLORI MESTRUALI

**Azione rilassante** sulla muscolatura uterina, cui consegue una **riduzione** della sintomatologia tipica dei **dolori mestruali** (dismenorrea).

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni o effetti collaterali, così come fenomeni di sovradosaggio.

Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali.

In caso di irritazioni cutanee collegabili all'utilizzo del cerotto, si raccomanda di sospendere il trattamento.

Segnalare al proprio medico eventuali altri effetti indesiderati che possono essere messi in relazione all'utilizzo del prodotto.

---

## MODALITÀ D'USO

---

Estrarre il cerotto "Pink" dalla cartina che lo contiene, togliere la pellicola protettiva e applicarlo direttamente sulla pelle pulita e asciutta sul coccige.

L'azione si manifesta entro 30 minuti dall'applicazione. Dopo 24-48 ore rimuovere il cerotto. Se necessario sostituirlo con un altro cerotto, sino al termine del ciclo mestruale.

In casi limitanti di sintomatologia intensa, anche di patologia organica come endometriosi, possono essere aggiunti più cerotti.

---

## CONFEZIONE

---

10 CEROTTI ADESIVI

---

## CONSERVAZIONE

---

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e al riparo dalla luce solare diretta.

Teme l'umidità. Non danneggiare la confezione per evitare la perdita di sicurezza igienica.

Tenere lontano da emissioni elettromagnetiche.

**Marchio e prodotto di proprietà di:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY





[Stampa](#) | [Scarica il dataset](#)

### Elenco dei dispositivi medici

#### Criteri di ricerca:

Denominazione fabbricante:  
 Codice fiscale fabbricante:  
 Partita IVA / VAT number fabbricante:  
 Codice nazione fabbricante:  
 Denominazione mandatario:  
 Codice fiscale mandatario:  
 Partita IVA / VAT number mandatario:  
 Codice nazione mandatario:  
 Tipologia dispositivo:  
 Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: **1348399**  
 Codice attribuito dal fabbricante:  
 Nome commerciale e modello:  
 Classificazione CND:  
 Descrizione CND:  
 Normativa:  
 Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD):

### Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al:18/07/2023

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO								FABBRICANTE/ASSEMBLATORE						
TIPOLOGIA	IDENTIFICATIVO		CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CND	NORMATIVA	CLASSE CE	DATA PRIMA PUBBLICAZIONE	DATA FINE		DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA/VAT NUMBER	NAZI
DISPOSITIVO	REGISTRAZIONE	ISCRITTO AL REPERTORIO							IMMISSIONE IN COMMERCIO	RUOLO AZIENDA				
Dispositivo	1348399	N	8058253640018	PINK	M0599 - CEROTTI - ALTRI	D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42	I - Classe I non sterile e senza funzioni di misura	15/10/2015		FABBRICANTE	FREE S.R.L.	02388900223	02388900223	I

<<< Pagina:1 >>> Num. Pagine:1 Num. Dispositivi:1

[Indietro](#)